


Technisches Datenblatt

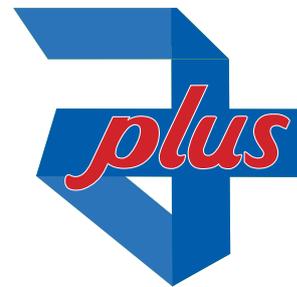

MaiMed[®] MyClean DS A Schnelldesinfektion

Alkoholische Schnelldesinfektion

- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae) und begrenzt viruzid (alle behüllten Viren gemäß RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno-, SV40-Viren
- Für die Tränkung von Tüchern geeignet
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Aufdrocknen
- VAH-gelistet



Anwendung:

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von alkoholbeständigen, wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar im patientennahen Umfeld in Kliniken, Praxen, Ambulanzen oder Pflegeeinrichtungen. (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z. B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.). Materialverträglichkeit ggf. an unauffälliger Stelle prüfen. Oberflächen vollständig mit der Lösung benetzen und die Desinfektionslösung ggf. mit einem hygienisch sauberen Einmaltuch verteilen. Dabei Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Das Präparat trocknet schnell ab. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Nicht zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und invasiven Medizinprodukten geeignet.

Ausführungen:

MaiMed[®] MyClean DS A – Schnelldesinfektion

Artikelbeschreibung	Duft	Pack-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Schnelldesinfektion	Neutral	1 Liter	79615	4046153116201	10308644	12 Flaschen
Schnelldesinfektion	Neutral	5 Liter	79649	4046153118540	10843828	2 Kanister
Schnelldesinfektion	Neutral	10 Liter	79616	4046153117017	10308650	1 Kanister

Einwirkzeiten:

Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid (M.-terrae) (VAH, EN 16615, EN 14348; hohe Belastung):	1 Minute
Vaccinia Ankara/BVDV (HCV) (EN 14476; mit Belastung 10 % FBS):	30 Sekunden
Rota-Viren (EN 14476; ohne Belastung):	30 Sekunden
Noro-Viren (EN 14476; hohe Belastung):	5 Minuten
Adeno-Viren (EN 14476; geringe Belastung):	1 Minute
SV40-Viren (DVV/RKI, mit Belastung 10 % FBS):	15 Minuten

Zusammensetzung: In 100 g Lösung sind enthalten: Wirkstoffe: 8,0 g 1-Propanol, 42 g Ethanol.


Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH
Medizinprodukt: Klasse IIa
UFI: 66J0-D0UY-Y00V-4GMU

eClass: 30-30-01-02

Verwendbarkeit: 3 Jahre

Haltbarkeit nach Anbruch:  nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

Symbole:

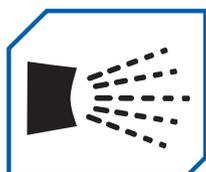

 MaiMed[®] GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany
TD-MaiMed[®] MyClean DS A-Schnelldesinfektion-2021-05