


Technisches Datenblatt

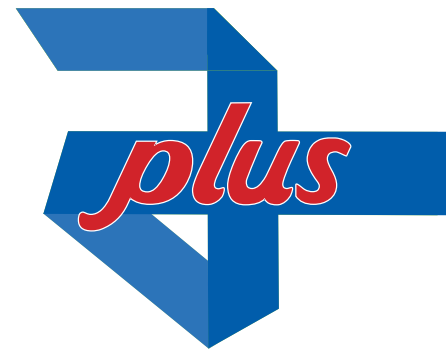

MaiMed® MyClean DS OA

Schnelldesinfektion ohne Alkohol

- Gebrauchsfertige, alkoholfreie Lösung zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen (auch Acrylglas)
- Wirkt bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid PLUS (wirksam gegen behüllte Viren z. B. HIV, HBV, HCV sowie Influenza-/Grippe-Viren)
- Hohe Materialverträglichkeit auch bei Acrylglas
- Für die Tränkung von Tüchern geeignet
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Gute Reinigungsleistung
- Gute Benetzung
- Schnelle Auftrocknung
- VAH-gelistet



Anwendung: Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig mit MaiMed® MyClean DS OA benetzen und die Desinfektionslösung ggf. mit einem hygienisch, sauberen Einmaltuch verteilen. Dabei die Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Nur für den professionellen Gebrauch.

Ausführungen: MaiMed® MyClean DS OA – Schnelldesinfektion ohne Alkohol

| Artikelbeschreibung | Pack-Inhalt | Art.-Nr./REF | EAN | PZN | Pack/VE |
|----------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------|-------------|
| Schnelldesinfektion ohne Alkohol | 1 l | 79613 | 4046153116164 | 10305769 | 12 Flaschen |
| Schnelldesinfektion ohne Alkohol | 10 l | 79614 | 4046153116188 | 10305781 | 1 Kanister |

Einwirkzeiten:

| Wirksamkeit gem. EN-Normen und DGHM/VAH | |
|--|------------|
| Bakterizidie (EN 13727, EN 16615 – 4-Felder-Test), Levurozidie (EN 13624, EN 16615 – 4-Felder-Test; hohe Belastung): | 1 Minute |
| Viruswirksamkeiten (EN 14476) | |
| Begrenzt viruzid PLUS: | 1 Stunde |
| Begrenzt viruzid: | 1 Minute |
| Vaccinia Ankara (inkl. HIV, HBV, HCV; hohe Belastung): | 1 Minute |
| Noro-Viren (hohe Belastung): | 30 Minuten |
| Adeno-Viren (hohe Belastung): | 1 Stunde |

Zusammensetzung: In 100 g Lösung sind enthalten: Wirkstoffe: 0,1 g 2-Phenoxyethanol; 0,35 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid; 0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin


Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

eClass: 30-30-01-02

Verwendbarkeit: 3 Jahre

Haltbarkeit nach Anbruch: nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

Symbole:

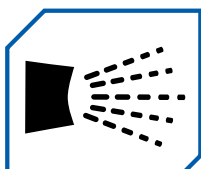

MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MaiMed® MyClean-DS-OA-202011